

| Šta?                                                                                                                                                              | Koliko često?                                                | Kako?                                                                                                                                                                                      | Sa čim?                                                                                                                                                | Ko?                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU                                                     | pre restaurativnih zahvata, posle svakog pacijenta           | gotov rastvor utrljati na suve ruke 30 sec                                                                                                                                                 | <b>desderman®</b> care<br><b>desmanol®</b> pure                                                                                                        | lekar,<br>asistent |
|  PRANJE RUKU                                                                      | kod zaprljanosti po potrebi                                  | preparat naneti na vlažne ruke i trljati 1 min., zatim isprati vodom                                                                                                                       | <b>esemt看®</b> WL                                                                                                                                      | lekar,<br>asistent |
|  HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU                                                       | pre hirurških zahvata                                        | na oprane ruke naneti preparat i utrljavati 3 min.; ostaviti da se osuši i navući rukavice                                                                                                 | <b>desderman®</b> care                                                                                                                                 | lekar,<br>asistent |
|  NEGA RUKU                                                                        | nekoliko puta dnevno po potrebi                              | emulziju naneti na čiste ruke i blago utrljati                                                                                                                                             | <b>esemt看®</b> SL<br><b>sensiva®</b> PE                                                                                                                | lekar,<br>asistent |
|  RENTGEN FILMOVI                                                                 | posle vađenja iz usta                                        | obrisati                                                                                                                                                                                   | <b>mikrozid®</b> sensitive maramice                                                                                                                    | asistent           |
|  ISPIRANJE USTA PRE RESTAURATIVNIH ZAHVATA                                      | pre, za vreme i posle zahvata                                | 1 x dozirati preko dozera, isprati usta i ispljunuti                                                                                                                                       | <b>octenident®</b>                                                                                                                                     | pacijent           |
|  ISPIRANJE USTA PRE OPERATIVNIH ZAHVATA                                         | pre i posle operativnog zahvata                              | sa oko 20 ml preparata 20 sec. ispirati usta i ispljunuti                                                                                                                                  | <b>octenisept®</b>                                                                                                                                     | pacijent           |
|  ISPIRANJE OTVORENIH KANALA KORENA ZUBA I ZUBNIH DŽEPOVA                        | 3 x uzastopce                                                | sa kanilom                                                                                                                                                                                 | <b>octenisept®</b>                                                                                                                                     | lekar              |
|  INSTRUMENTI                                                                    | posle svake upotrebe                                         | čišćenje i dezinfekcija potapanjem u kadicu                                                                                                                                                | <b>gigasept®</b> instru AF<br>Doziranje:<br>1,5% rastvor – 60 min.<br>2 % rastvor – 30 min.<br>3% rastvor – 15 min.<br>sa ultrazvukom 3% rast. – 5 min | asistent           |
|  ROTIRAJUĆI INSTRUMENTI (boreri, freze, ako su isključivo od plemenitih metala) | posle svakog korišćenja                                      | instrumente potopiti, posle predviđenog vremena dejstva izvaditi i ostaviti da se osuše                                                                                                    | <b>rotasept®</b><br>Vreme dejstva: 15 min.<br>Sa ultrazvukom: 5 min.                                                                                   | asistent           |
|  NASADNI UREDJAJI I TURBINE                                                     | posle svakog pacijenta                                       | dezinfekcija prebrisavanjem                                                                                                                                                                | <b>mikrozid®</b> AF maramice                                                                                                                           | asistent           |
|  USISNI SISTEMI SEPARATORI AMALGAMA                                             | obavezno 1–2 x dnevno, u podne i uveče posle završetka posla | dezinfekcija i čišćenje u jednom ciklusu: napraviti 2 lit. radnog rastvora: 1, 5 lit. za dezinfekciju usisnih sistema, 0,5 za dezinfekciju fontane, nakon vremena delovanja isprati vodom. | <b>aspirmatic®</b><br>Doziranje i vreme delovanja:<br>2% rastvor - 30 min.                                                                             | asistent           |
|                                                                                                                                                                   | jednom do 2 x nedeljno                                       | napraviti 2 lit. radnog rastvora: 1, 5 lit. za dezinfekciju usisnih sistema, 0,5 za dezinfekciju fontane, nakon vremena delovanja isprati vodom                                            | <b>aspirmatic®</b> cleaner<br>Doziranje i vreme delovanja: 5% rastvor - 120 min.                                                                       |                    |
|  ZUBNE PROTEZE I SILIKONSKI OTISCI                                              | nakon uzimanja otisaka, posle dobijanja iz laboratorije      | potopiti                                                                                                                                                                                   | <b>perform®</b><br>Napraviti 2% radni rastvor<br>Vreme dejstva 10 min.                                                                                 | asistent           |
|  STOMATOLOŠKA STOLICA                                                           | posle svakog pacijenta                                       | dezinfekcija prebrisavanjem                                                                                                                                                                | <b>mikrozid®</b> AF<br><b>mikrozid®</b> universal maramice                                                                                             | asistent           |
|  RADNE POVRŠINE TELEFONSKE SLUŠALICE, LAMPE I KVAKE                             | nekoliko puta dnevno                                         | dezinfekcija prebrisavanjem                                                                                                                                                                | <b>mikrozid®</b> universal maramice                                                                                                                    | asistent           |
|  RADNE POVRŠINE I PODOVI                                                        | na kraju radnog dana                                         | dezinfekcija prebrisavanjem                                                                                                                                                                | <b>terralin®</b> protect<br>0,5% rastvor – 60 min.                                                                                                     | asistent           |