


# schülke +

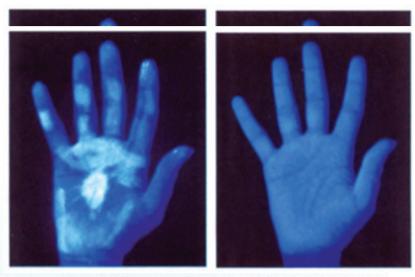

**miofarm**

[www.miofarm.rs](http://www.miofarm.rs)

# PLAN HIGIJENE

## za stomatološku praksu

**schülke -+**



Šta?	Koliko često?	Kako?	Sa čim?	Ko?
HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU	pre restaurativnih zahvata, posle svakog pacijenta	gotov rastvor utrljati na suve ruke 30 sec	<b>desderman® care</b> <b>desmanol® pure</b>	lekar, asistent
PRANJE RUKU	kod zaprljanosti po potrebi	preparat naneti na vlažne ruke i trljati 1 min., zatim isprati vodom	<b>esemtan® WL</b>	lekar, asistent
HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU	pre hirurških zahvata	na oprane ruke naneti preparat i utrljavati 3 min.; ostaviti da se osuši i navući rukavice	<b>desderman® care</b>	lekar, asistent
NEGA RUKU	nekoliko puta dnevno po potrebi	emulziju naneti na čiste ruke i blago utrljati	<b>esemtan® SL</b> <b>sensiva® PE</b>	lekar, asistent
INSTRUMENTI	posle svake upotrebe	čišćenje i dezinfekcija potapanjem u kadicu	<b>gigasept® instru AF</b> Doziranje: 1,5% rastvor – 60 min. 2 % rastvor – 30 min. 3% rastvor – 15 min. sa ultrazvukom 3% rast. – 5 min	asistent
OSETLJIVI APARATI (ekrani monitora, touch screen, tableti, mobilni telefoni)	nekoliko puta dnevno po potrebi	dezinfekcija prebrisavanjem	<b>mikrozid® universal maramice</b>	asistent
ULTRAZVUČNE SONDE	posle svakog pacijenta			
ROTIRAJUĆI INSTRUMENTI (boreri, freze, ako su isključivo od plemenitih metala)	posle svakog korišćenja	instrumente potopiti, posle predviđenog vremena dejstva izvaditi i ostaviti da se osuše	<b>rotasept®</b> Vreme dejstva: 15 min. Sa ultrazvukom: 5 min.	asistent
NASADNI UREDJAJI I TURBINE	posle svakog pacijenta	dezinfekcija prebrisavanjem	<b>mikrozid® AF</b> maramice	asistent
USISNI SISTEMI SEPARATORI AMALGAMA	obavezno 1–2 x dnevno, u podne i uveče posle završetka posla	dezinfekcija i čišćenje u jednom ciklusu: napraviti 2 lit. radnog rastvora: 1, 5 lit. za dezinfekciju usisnih sistema, 0,5 za dezinfekciju fontane, nakon vremena delovanja isprati vodom.	<b>aspirmatic®</b> Doziranje i vreme delovanja: 2% rastvor - 30 min.	asistent
	jednom do 2 x nedeljno	napraviti 2 lit. radnog rastvora: 1, 5 lit. za dezinfekciju usisnih sistema, 0,5 za dezinfekciju fontane, nakon vremena delovanja isprati vodom	<b>aspirmatic® cleaner</b> Doziranje i vreme delovanja: 5% rastvor - 120 min.	
ZUBNE PROTEZE I SILIKONSKI OTISCI	nakon uzimanja otiska, posle dobijanja iz laboratorije	potopiti	<b>perform®</b> Napraviti 2% radni rastvor Vreme dejstva 10 min.	asistent
STOMATOLOŠKA STOLICA	posle svakog pacijenta	dezinfekcija prebrisavanjem	<b>mikrozid® AF</b> <b>mikrozid® universal maramice</b>	asistent
RADNE POVRŠINE TELEFONSKE SLUŠALICE, LAMPE I KVAKE	nekoliko puta dnevno	dezinfekcija prebrisavanjem	<b>mikrozid® universal maramice</b>	asistent
RADNE POVRŠINE I PODOVI	na kraju radnog dana	dezinfekcija prebrisavanjem	<b>terralin® protect</b> 0,5% rastvor – 60 min.	asistent